



Școala Gimnazială „Móra Ferenc” – Móra Ferenc Általános Iskola
Str. Victoriei, Nr.16/A, Odorheiu Secuiesc, Cod.535600, Jud:Harghita
Telefon: 0266-218359 Fax: 0266-219388, e-mail: office@moraferenc.ro

Cod fiscal:13378866 Cont:RO36TRE735224650220 Trezoreria Odorheiu Secuiesc

Nr. înreg. 2557/2021

PROCEDURĂ PRIVIND TESTAREA ANTIGEN NONINVAZIVĂ EFECTUATĂ DIN PROBA DE SALIVĂ

Consiliul de Administrație al Șcala Gimnazială „Móra Ferenc”, Odorheiu Secuiesc a hotărât în data de **02.12.2021**, cf. Ordinului Comun MS-ME 5.608/2506/19.11.2021, ca testarea cu teste rapide antigen non-invazive din proba de salivă să se efectueze **la domiciliul elevului**, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal.

În acest sens, testele vor fi distribuite elevilor de către unitatea de învățământ, în ziua de Vineri pentru a se efectua testarea la domiciliu. Testarea se efectuează Luni și Joi dimineață, **înaintea începerii orelor de curs.**

Instrucțiuni generale de utilizare a testelor rapide antigen, efectuate din proba de salivă:

- a) se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandărilor producătorului;
- b) se păstrează testele între +2 — +30°C;
- c) se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de aluminiu;
- d) se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare;
- e) se evită consumul de alimente/băuturi **cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului**, în funcție de prevederile producătorului;
- f) se asigură permanent dezinfecția corectă a mâinilor și suprafețelor.

Pentru testarea propriu-zisă:

1. se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și se va folosi cât de curând posibil;
2. se așază dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată;
3. se scoate un tub de extracție și o sticlă de soluție. Se scoate capacul și se adaugă soluția în tubul de extracție;
4. se scuipă saliva în recipientul pentru colectarea salivei;
5. se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se transferă în tubul de extracție;
6. se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca deșeu medical;



Școala Gimnazială „Móra Ferenc” – Móra Ferenc Általános Iskola
Str. Victoriei, Nr.16/A, Odorheiu Secuiesc, Cod.535600, Jud:Harghita
Telefon: 0266-218359 Fax: 0266-219388, e-mail: office@moraferenc.ro

Cod fiscal:13378866 Cont:RO36TRFZ35224650220 Trezoreria Odorheiu Secuiesc

7. se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția;
8. se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de testare (casetă);
9. se citește rezultatul după 10—15 minute;
10. se interpretează rezultatul conform instrucțiunilor de utilizare:
 - **pozitiv**: apar două linii. O linie colorată apare în zona-martor (C) și o altă linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare;
 - **negativ**: o linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T);
 - **neconcludent**: linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile ale rezultatelor nule. Se revizuieste procedura și se repetă testul utilizând o nouă casetă de testare.
11. Rezultatul testului se transmite de către părinte/reprezentant legal/elev major, **până la ora 7.50**, în zilele de **Luni și Joi**, printr-un mesaj prin e-mail pe adresa de email test@moraferenc.ro numai rezultatul “pozitiv”, sau în privat, pe numărul de telefon al dirigintelui sau al învățătorului.
12. Părinții păstrează poza cu dovada testării pozitive.

Documentele video:

Video 1 - Ghid de utilizare a testelor antigen pe bază de salivă

<https://youtu.be/6OrBMotw3eI>

Video 2 - Demonstrație utilizare test antigen pe bază de salivă

<https://youtu.be/SmA9HcWdvcs>

Director,
Tifán Irén

